

5) A E Dの電源を入れる



電源を入れた後は
音声メッセージで案内されます。

6) 電極パッドを患者の胸に貼る

カードリッジから電極パッドを取り出し、表面に描かれている位置に貼ります。



『絵の通りにパッドを貼ります。』



パッドが貼られると
自動的に解析が始まります。

7) 解析



『身体に触れないでください。解析中です。』

心電図が自動的に解析され、除細動が必要であれば
点滅しているオレンジのボタンを押すように指示がきます。



8) 除細動を行う ショックボタンを押します。



『ショックが必要です。身体から離れてください。
点滅しているオレンジのボタンを押してください。』

自動的にエネルギーが充電され、
オレンジのボタンが点滅します。



※ショック実施前に必ず確認してください

- 声を出して、周囲の人が患者から離れるよう指示します
- 手振りでも患者から離れるように指示します
- 患者の身体に誰も触れていないのを確認します



9) パッドを貼ったまま直ちに胸骨圧迫を再開する

電気ショックを行った後、何らかの応答や目的のある仕事
(嫌がるなどの体動)、あるいは救急隊が到着し引継ぎ
まで胸骨圧迫を続けます。

2分間の心肺蘇生の後にA E Dが再度心拍を解析し、
除細動が必要かどうか指示します。

※患者の状態が変化すると、A E Dが反応します。

10) 救急隊に情報を伝える

救急隊が到着したら、以下の項目を伝えましょう

- ・患者が倒れた時の状況
- ・容態の変化
- ・応急手当の内容
- ・電気ショックの回数

「i」インフォメーションボタンを押すと、心肺蘇生法を補助する
音声ガイダンス（CPRコーチング機能）を聞くことができます。



※YouTubeのALSOKチャンネルで心肺蘇生法の説明動画を公開しております。ぜひご利用ください。
URL : <https://www.youtube.com/watch?v=jgnxtvliITCg>



ALSOK

〒107-8511
東京都港区元赤坂1-6-6
<http://www.alsok.co.jp/>



●販売店/お問い合わせ

ALSOK 大阪中央支社
担当：
電話：06-6949-2700

